

Substanzen	Desinfektionsmittel																							
Hersteller	Anios																							
Schnelldesinfektionsmittel	Antiseptica																							
Desinfektionsmittel	Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH																							
Artikel	Aquaenius Schweiz GmbH																							
AMALFI phthalatfrei	B. Braun Melsungen AG																							
TORINO phthalatfrei	Bode Chemie GmbH																							
CORDOBA ACTICIDE® phthalatfrei	cosiMed GmbH																							
PERI phthalatfrei	DAN MORE																							
CHICAGO M ACTICIDE® phthalatfrei	DESOMED																							
PAVONA phthalatfrei	DR. SCHUMACHER GMBH																							
	DR. Weigert																							
	Ecolab Deutschland GmbH																							
	GAMA Healthcare Ltd.																							
	JOYA International																							
	Lysoform																							
	Medical Service Höber GmbH & Co.K																							
	OPTIMUM11 GMBH																							
	orochemie GmbH + Co. KG																							
	Pepler GmbH																							
	PINO GmbH																							
	Reckitt Benckiser																							
	SARAYA EUROPE																							
	Schülke & Mayr GmbH																							
	Tana Chemie GmbH																							

Prüfergebnis:
Kommentar:

Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da sonst Produktschädigungen nicht auszuschließen sind.
Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluß nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistungen auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit der AKV Produkte ablehnen.
Wir empfehlen Ihnen, vor Anwendung eines Desinfektionsmittels auf den AKV Produkten, an einer nicht sichtbaren Stelle des Bezuges eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Reinigung vor und nach der Desinfektion:

- Vor der Desinfektion die öl- und fetthaltigen Rückstände auf der Materialoberfläche mit einer pH-neutralen Seifenlösung entfernen.
- Erst danach ist die Materialoberfläche zu desinfizieren.
- Zum Reinigen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden.
- Seifenreste mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Benutzen Sie auf KEINEN FALL Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressive Seifen, Bleich- oder Scheuermittel.
- Diese Produkte können das Kunstleder angreifen und seine Lebensdauer verkürzen!
- Blutflecken bitte umgehend mit kaltem Wasser entfernen.
- Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten.
- Nach der Desinfektion die Materialoberfläche mit Wasser abwischen.

Legende:

- Desinfektionsmittel geeignet
- Desinfektionsmittel nicht geeignet